

POSTERICARE® Hämorrhoiden-Stick

zur Anwendung bei vorstehenden Hämorrhoiden

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen.

Heben Sie diese Gebrauchsanweisung auf, vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihre Ärztin / Ihren Arzt oder an Ihre Apotheke.

Anwendungsgebiet

Zur Rückverlagerung der aus dem Analkanal vorstehenden (prolabierten) Hämorrhoiden in ihre ursprüngliche physiologische Position im Analkanal.

Produktinformationen

Mit Hilfe des POSTERICARE® Hämorrhoiden-Sticks können Hämorrhoiden zurück an ihre natürliche Position geschoben und dort gehalten werden. Der Stick besteht aus hochwertigem, medizinischem Silikon und besitzt eine ideal an den Analkanal angepasste Form. Dadurch kann der Hämorrhoiden-Stick schonend und typischerweise ohne unangenehme Empfindungen in den Analkanal eingeführt werden. Die etwas verdickte Spitze des Hämorrhoiden-Stick erschwert ein zufälliges und unbeabsichtigtes Herausfallen des Produktes. Der bügelförmige Griff verhindert, dass das Produkt zu tief eingeführt wird. Zudem lässt sich der Hämorrhoiden-Stick mit Hilfe des Griffs wieder leicht aus dem Analkanal entfernen.

Der Hämorrhoiden-Stick verbleibt im Analkanal, und verhindert so durch mechanischen Druck ein erneutes Herausfallen der Hämorrhoiden. Dies ist insbesondere bei einem fortgeschrittenen Hämorrhoidalleiden hilfreich, bei dem die Hämorrhoiden so stark vergrößert sind und der Schließmuskel möglicherweise geschwächt ist, dass sie in bestimmten Situationen aus dem Analkanal herausfallen.

Was ein Hämorrhoidalleiden ist

Ein Hämorrhoidalleiden ist die am weitesten verbreitete anale Erkrankung. Sie entsteht, wenn sich natürlicherweise vorhandenes Gewebe am Übergang zum Analkanal vergrößert. Dies kann aus verschiedenen Gründen geschehen, beispielsweise durch ungesunde Ernährungsgewohnheiten, eine primär im Sitzen ausgeübten Tätigkeit oder zu starkem Pressen beim Stuhlgang.

Hämorrhoidalleiden gehen oft mit verschiedenen Symptomen wie Juckreiz, Brennen bis hin zu schmerzhaftem Brennen, Nässen oder Blutungen einher. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Hämorrhoiden aus dem Analkanal herausfallen und das eigentlich im Körper liegende Gewebe äußeren Einflüssen ausgesetzt ist.

Anwendung von POSTERICARE® Hämorrhoiden-Stick

Der POSTERICARE® Hämorrhoiden-Stick wird in einer entspannten Position mit sanftem, aber stetigen Druck in den Analkanal eingeführt und verbleibt dort für mindestens 10 bis 20 Minuten, jedoch nicht länger als 60 Minuten. Da die Hämorrhoiden besonders beim Stuhlgang dazu neigen, aus dem Analkanal hervorzutreten, ist eine Anwendung nach jedem Stuhlgang sinnvoll. Eine mehrmals tägliche Anwendung, je nach Bedarf, ist möglich.

Geeignete entspannte Positionen zum Einführen des Produktes können eine seitlich liegende Körperhaltung oder eine Hockposition sein. Nach dem Einführen kann dem normalen Alltag nachgegangen werden.

Hinweis: Um das Einführen und damit das Zurückschieben der gereizten Hämorrhoiden zu erleichtern, kann auf den Hämorrhoiden-Stick eine kleine Menge einer im Analkanal anzuwendenden Creme oder Salbe (z.B. POSTERISAN® protect) aufgebracht werden.

Bitte reinigen Sie den Hämorrhoiden-Stick vor der ersten und nach jeder Anwendung mit warmem Wasser. Eine Desinfektion ist nicht notwendig, kann aber bei individuellem Wunsch mit einem alkoholischen Desinfektionstuch durchgeführt werden. Bitte verwenden Sie keine sonstigen Haushaltsreiniger oder anderweitige Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, da sie das Produkt beschädigen können.

Hinweis: Wenn Sie die Umverpackung zur Aufbewahrung des POSTERICARE® Hämorrhoiden-Sticks nutzen, achten Sie bitte darauf, dass der Stick nach der Reinigung vollständig trocken ist, bevor Sie ihn zurück in die Verpackung legen.

Hinweise zur Mehrfachanwendung

Der POSTERICARE® Hämorrhoiden-Stick ist zur Mehrfachanwendung durch dieselbe Person vorgesehen.

Hinweise für die Anwendung während der Schwangerschaft, Stillzeit, nach Entbindung

POSTERICARE® Hämorrhoiden-Stick ist auch zur Anwendung in der Schwangerschaft, nach der Entbindung und während der Stillzeit geeignet.

Anwendungsbeschränkungen

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Silikon sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Wenn bei der Anwendung des Produktes Schmerzen oder verstärkte Blutungen auftreten, halten Sie bitte medizinische Rücksprache.

Bitte suchen Sie ebenfalls medizinischen Rat, wenn Beschwerden unter der Anwendung nicht ausreichend gelindert werden.

Es liegen keine ausreichenden Daten zur Verwendung bei Personen unter 18 Jahren vor. Vor einer Anwendung sollte Rücksprache mit der Arztpraxis gehalten werden.

Mögliche Nebenwirkungen

Zu Beginn der Therapie kann die Anwendung bei stark gereizten Hämorrhoiden mit leichtem Brennen einhergehen. Mit zunehmendem Therapieeffekt sollten diese anfänglichen Beschwerden besser werden.

Die Anwendung des POSTERICARE® Hämorrhoiden-Stick kann mit dem Gefühl des Rausrutschens oder einem Fremdkörpergefühl im Analkanal einhergehen. In diesen Fällen kann es hilfreich sein, das Produkt im Liegen anzuwenden. Eine leichte Unannehmlichkeit beim Tragen stellt keinen Grund dar, die Anwendung zu unterbrechen.

Meldung von Nebenwirkungen/Vorkommnissen

Wenn Sie Nebenwirkungen bzw. Vorkommnisse bemerken, die zu einer Gesundheitsbeeinträchtigung führen können oder geführt haben, wenden Sie sich bitte an DR. KADE (Tel.: +49 30 72082-0, E-Mail: info@kade.de), Ihre Arztpraxis oder Ihre Apotheke. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind. Indem Sie Nebenwirkungen bzw. Vorkommnisse melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Medizinprodukts zur Verfügung gestellt werden.

Warnhinweise im Falle einer Beschädigung des Produkts

Wenn der Stick beschädigt ist oder wenn sich das Aussehen oder die Oberfläche des Sticks fühlbar verändert haben, verwenden Sie das Produkt nicht und informieren Sie den Hersteller.

Aufbewahrung und Haltbarkeit

Der POSTERICARE® Hämorrhoiden-Stick ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Der Stick hat in der Originalverpackung ab Herstellungsdatum eine Haltbarkeit von 10 Jahren. Die Verwendbarkeitsfrist des Produkts ist auf der Faltschachtel aufgedruckt. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach diesem Datum.

Nach der ersten Anwendung empfehlen wir den Gebrauch des POSTERICARE® Hämorrhoiden-Sticks für maximal drei Jahre.

Entsorgung

Wenn der POSTERICARE® Hämorrhoiden-Stick nicht mehr benötigt wird, kann er mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Packungsgrößen

Packung mit 1 POSTERICARE® Hämorrhoiden-Stick





DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistraße 2, 12277 Berlin, Deutschland

Telefon: +49 30 72082-0

Telefax: +49 30 72082-200

E-Mail: info@kade.de

Diese Gebrauchsanweisung wurde erstellt: 2025-08

Bedeutung der Symbole auf der Verpackung						
						
Chargen- bezeichnung	Verwendbar bis	Zur Wiederverwen- dung an einem einzelnen Patienten	Gebrauchs- an- weisung beachten	Hersteller	Medizinprodukt	Eindeutige Produktidentifizierung

Bei Fragen können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an:

info@kade.de

Möchten Sie mehr zum Thema Hämorrhoiden und DR. KADE Produkten erfahren?

Informationen dazu finden Sie auf www.pogesund.de

Wir wünschen Ihnen gute Besserung!